

Denominazione:Semimaschera facciale filtrante **FFP2 NR D** Senza valvola**3FMASK Ref. M3001N**Fabbricante: **3 F srl** Via Sant'Eufemia, snc 66010 Fara Filiorum Petri (Chieti) ITALIA

Il prodotto risponde ai requisiti della norma

UNI EN 149:2001+A1:2009, ed è stato fabbricatoin conformità al Regolamento **UE 2016/425** e D.lgs **475/1992**.Prodotte in
**CAMERA
BIANCA
ISO 8**Colore **BIANCO****CARATTERISTICHE:**

3FMASK Ref. M3001N è una semimaschera filtrante "FFP2 NR D - DPI categoria III" prodotta totalmente in Italia, tra le poche in camera bianca ISO 8, che risponde alle direttive UNI EN 149:2001+A1:2009, certificata da un Laboratorio accreditato Accredia ed è dotata di marcatura CE 0161.

La forma, dal design ergonomico a "becco" è stato progettato per aiutare il personale a respirare più facilmente durante il turno di lavoro e a proteggere totalmente il naso, la bocca e il mento. L'elevata qualità del tipo di materiale da noi utilizzato offre alte prestazioni in termini di durata e bassa resistenza respiratoria, permettendo di coprire con un solo dispositivo un intero turno di lavoro.

Inodore**Anallergica****Latex Free**

La semimaschera FFP2 3FMASK Ref. M3001N è un dispositivo di protezione individuale capace di filtrare oltre il **95%** delle microparticelle sospese nell'aria. Protegge il personale che opera nelle strutture sanitarie e non sanitarie dagli agenti patogeni trasmissibili per via aerea, batteri, virus, allergeni, nebbia, polveri, aerosol, fumo, gas di scarico di auto ed altri agenti contaminanti. Assicura un ottimo livello di aderenza e comfort, adattabile alle diverse conformazioni facciali, grazie al ferretto stringinaso per adattarsi al setto nasale, regolabile e a tenuta. Comodo il sistema di tenuta che non tira le orecchie e ripartisce la trazione tra occipite e nuca grazie ai due elastici nucali. È compatibile con altri DPI (*occhialini, visiere, etc.*), per cui non perde la sua efficacia protettiva.

La nostra 3FMASK Ref. M3001N ha superato il test di protezione da polveri di dolomite (si tratta di un test opzionale di intasamento con polveri di Dolomite).

DETTAGLI TECNICI:

Materiale composto da 5 strati:

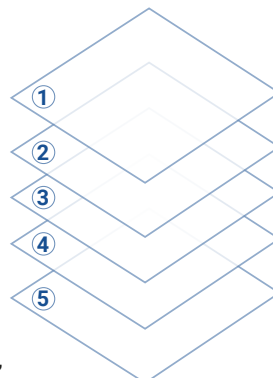
1. **Superficie esterna:** Polipropilene Spunbond bianco
2. **Filtro:** Polipropilene Meltblown bianco
3. **Filtro:** Polipropilene Meltblown bianco
4. **Filtro:** Polipropilene Meltblown bianco
5. **Superficie interna:** Polipropilene Spunbond bianco

Dimensioni (cm): 23x9 (± 0,5).**Tipologia:** FFP2 NR D Senza valvola monouso - DPI III Cat.**Misura:** Taglia unica**Forma:** Pieghevole**Elastici:** 2 elastici nucali**Standard di filtrazione:**

UNI EN 149:2001+A1:2009

Condizioni di conservazione: Mantenere in condizioni buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento.**Scadenza:** 5 anni dalla data di produzione.

È stata testata anche secondo la normativa EN 14683:2019. Possiede le caratteristiche di filtrazione batterica e resistenza agli spruzzi analoghe a quelle richieste per le mascherine chirurgiche di tipo IIR secondo la normativa EN 14683:2019.

LOTTO, DATA DI PRODUZIONE E SCADENZA sono riportati sulle singole semimaschere



ISTRUZIONI D'USO:

- 1) lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica.
- 2) Separare delicatamente i due lacci elastici.
- 3) Posizionare i lacci elastici dietro la nuca con entrambe le mani e regolarli fino ad ottenere il miglior comfort e la corretta adesione al volto.
- 4) Posizionare la semimaschera sotto il mento e poi sollevarla fino a coprire bocca e naso, accertarsi di averla indossata nel verso giusto.
- 5) Al termine dell'utilizzo per lo smaltimento fare riferimento alle indicazioni della normativa nazionale vigente.



CONFEZIONAMENTO:

Il cartone contiene **12 scatolette** da **25 pezzi** (300 pz). Ogni mascherina è **confezionata singolarmente** in buste di polipropilene. Per evitare eventuali contaminazioni.



DOTATI DI MARCATURA CE

Il CE è la dichiarazione di conformità alle norme europee relative ai dispositivi di protezione individuale: **EN 149:2001+A1:2009**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Regolamento UE 9 marzo 2016
n. 425 e DLGS 475/1992



AVVERTENZE

1. Le semimaschere filtranti sono dispositivi monouso e non vanno mai riutilizzate.
2. Per non danneggiare il materiale filtrante, non pulire il prodotto con acqua.
3. Conservare in ambiente non inquinato, privo di umidità e lontano da fonti di calore.
4. Se correttamente utilizzate, le semimaschere filtranti non arrecano danni e non determinano rischi aggiuntivi per gli utilizzatori.
5. Non utilizzare i dispositivi se la confezione è danneggiata.
6. Quando la semimaschera filtrante diventa umida o alterata deve essere sostituita.



Prodotte in
**CAMERA
BIANCA**
ISO 8

